

关注  
新一代的 VITEK 卡片

VITEK®2 Compact系统使用重新设计的VITEK试验卡，  
每张卡包含：

- 64个反应孔提供更准确的结果。
- 预先插好的接管，进一步减省手工步骤，减少交叉污染。
- 独有的条形码确保结果质量及可追踪性。

生物梅里埃对微生物分析方法及细菌分类的丰富经验开发出最新的卡片，满足微生物检验的需要。

- GN 卡用于革兰氏阴性杆菌鉴定
- GP 卡用于革兰氏阳性球菌及杆菌鉴定
- BCL 卡用于革兰氏阳性芽孢杆菌鉴定
- YST 卡用于酵母鉴定
- ANC 卡用于厌氧菌鉴定
- NH 卡用于苛生菌鉴定
- CBC 卡用于棒状杆菌及相关菌的鉴定
- 快速药敏卡包括革兰氏阴性菌药敏卡，非发酵菌药敏卡，葡萄球菌药敏卡，肠球菌、链球菌药敏卡，真菌药敏卡等



**GN鉴定卡**      **结果**  
(包括非发酵菌)      2-10小时  
(货号: 21341)  
AOAC RI 认证号: 020802

**GP鉴定卡**      **结果**  
(包括7种李斯特菌)      2-10小时  
(货号: 21342)  
AOAC RI 认证号: 120702

**BCL鉴定卡**      **结果**  
(包括炭疽芽孢菌)      14小时  
(货号: 21345)  
AOAC RI 认证号: 080801

**YST鉴定卡**      **结果**  
(酵母菌鉴定)      18小时  
(货号: 21343)

**NH鉴定卡**      **结果**  
(包括弯曲菌)      6小时  
(货号: 21346)

**ANC鉴定卡**      **结果**  
(厌氧菌鉴定)      6小时  
(货号: 21347)

**CBC鉴定卡**      **结果**  
(棒状杆菌鉴定)      8小时  
(货号: 21348)



生物梅里埃解决方案

在工业微生物实验室有超过1000台常规运行的  
鉴定及分型仪器



全自动鉴定及分型的质控方案

梅里埃诊断产品(上海)有限公司  
上海市黄浦区广东路 689号  
海通证券大厦 2802-05室  
邮编: 200001  
电话: (021) 5115 9355  
传真: (021) 5115 9455  
[www.biomerieux.com.cn](http://www.biomerieux.com.cn)

生物梅里埃中国有限公司  
电话: (852) 2356 7033  
传真: (852) 2330 2085  
  
北京办事处  
电话: (010) 6515 6963  
传真: (010) 6515 6993

华南办事处  
广州办事处  
电话: (020) 8762 7010  
传真: (020) 8762 7015  
  
成都办事处  
电话: (028) 8620 2052  
传真: (028) 8620 2051

  
**BIOMÉRIEUX**  
INDUSTRY



可追踪性

准确性

**VITEK® 2**  
— compact

高级全自动微生物鉴定  
及药敏分析系统

  
**BIOMÉRIEUX**  
INDUSTRY



# 生物梅里埃对微生物鉴定及药敏的专长 让微生物实验室步入新纪元。

- 改良的用户友好界面使用户更容易掌握系统的操作，增加生产力。
- 独有的真空充填器提供安全及高度自动化的工作流程。
- 无需手工接种的试卡及封口，避免交叉污染。
- 新的主机大大减少手工操作步骤：
  - 内置条形码阅读器即时确认用户输入卡片的资料。
  - 自动载入卡片，以减少手工上机的麻烦。
  - 仪器每15分钟阅读卡片，缩短分析时间。
  - 按用户的要求，试验完成后自动打印报告。



## 瞬间出结果！

我们设计VITEK2软件帮助您快速获得结果。

- 直观、易用、熟悉的Windows界面。
- 利用导览和过滤功能，方便查询鉴定和药敏结果。
- 快速结果搜索，可按患者、工作台、检测状态搜索。
- 日期、细菌种类、技术员和登录号码检索。
- 与LIS系统实现简便的数据交换。
- 自动验证和传输初期结果。
- 5-8小时提供药敏分析报告。


# 从常规鉴定到溯源的 完全的鉴定和分型的解决方案。



API手工鉴定系统



VITEK 2 Compact全自动微生物鉴定系统

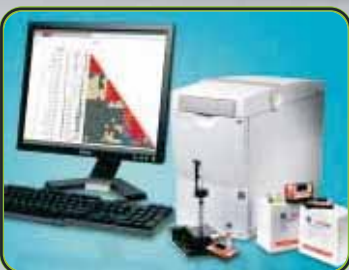

DiversiLab基因指纹图谱分析仪



## 关注 新的操作软件



- 更直观易学的图像界面省却用户培训所需时间，从而增加生产力。
- 所有试卡的状况在屏幕上一目了然，更快获得实验数据。
- 符合21CFR,Part11法规的要求方便制药企业获得出口认证。
- Windows Xp操作系统提供更高的安全性及其它实验室系统连接的可行性。
- 使用仪器前，用户需利用密码登录软件，确保系统的追踪性能。

## 简单操作，3步完成



### 标准化

初步分离后，简单、标准化地制备、稀释菌悬液后，将菌悬液置于载卡架槽内，并扫描条形码将标本编号输入电脑软件中。



### 可追溯性

从测试卡上的条形码读出卡片类型，由此将测试卡与标本和患者信息联系起来。



### 载入和运行装载仓


将载卡架放入装载仓内。当卡片充填完成后，将载卡架转移到装载仓。所有后续步骤均通过仪器自动进行。



**VITEK® 2 Compact提供额外的数据管理软件，满足用户的不同需要**



可选择的软件包括VITEK® 2 Compact Validation Package(认证软件包)，提升您的实验室，使最短时间内获得结果成为可能。

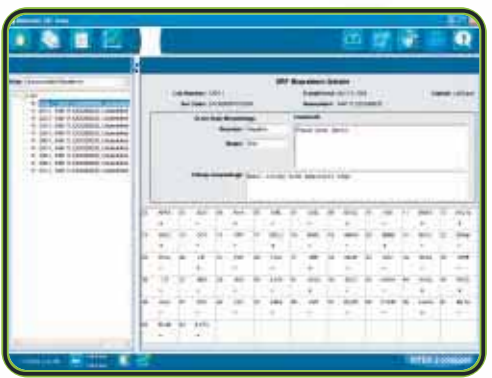

SRF，补充反应文件，用户化的特点，方便客户追踪常见特殊菌。这些细菌将会被自动传输到该区域软件并保存。这样可减少印刷上的错误，提高结果的可信性及质量。

## 抗生素选择简便



为便于选择最合适的抗生素，生物梅里埃公司开发了高级专家系统(AES)以提供快速、准确的“指纹”识别细菌耐药机制。

- 绿色指示符：**完全一致的结果
- 黄色指示符：**不一致的结果
- 红色指示符：**未知表型，核查结果
- 紫色标识符：**表型不在数据库中

**当耐药表型被识别后，AES推荐有利于提高治疗成功率的治疗方案。**